

# SOINS DES ONGLONS



Les affections aux onglons représentent un problème fréquent dans les exploitations bovines. Un problème aux onglons se manifeste à un moment ou à un autre de l'année chez environ 80 % des bovins, dont 25 % boitent visiblement, sans forcément se voir directement chez les autres. Les affections aux onglons ont également un impact négatif sur la production laitière. Les coûts de problèmes aux onglons sont estimés en moyenne à 50 euros par vache présente.

On distingue des problèmes de type infectieux et de type non infectieux. Dans le cas d'un problème infectieux, il s'agit en réalité toujours d'une infection cutanée et pas vraiment d'une infection de l'onglon même. Les principales infections étant la dermatite interdigitée classique, la dermatite digitée (maladie de Mortellaro), le panaritium et le tylome.

## A TRAITEMENT INDIVIDUEL

### Préparation

En premier lieu, il est capital de bien rincer la plaie pour permettre au produit appliqué de pénétrer au maximum dans la plaie.

Utiliser pour ce faire une solution **Virolux Pro 45** et une brosse manuelle. Il importe de nettoyer correctement l'espace interdigité avec une compresse de gaze ou un linge. Sécher ensuite la plaie.



# TRAITEMENT

## DIGIDERM PASTA 500 ML

### Contre la dermatite digitée:

- Nettoyer d'abord la zone souhaitée sur la peau avec un savon désinfectant, avec Virolux Pro, puis la sécher.
- Appliquer Kenofix spray.
- Etaler Digiderm pasta dans la région du talon et dans l'espace interdigité.
- Appliquer une compresse suffisamment épaisse.
- Bander la compresse avec un pansement élastique.

La compresse permet d'éviter que le bandage pénètre dans la plaie et s'y désagrège. L'utilisation d'une compresse permet de laisser le bandage plus de 5 jours. Sans compresse, il est préférable de le changer après 5 jours maximum. Répéter l'application si nécessaire.

### Contre une infection de la ligne blanche:

- Eliminer l'excès de corne décollée dans la zone souhaitée.
- Etaler Digiderm pasta sur la zone.
- Appliquer suffisamment de compresses.
- Bander la compresse avec un pansement élastique.

Retirer le bandage après 5-7 jours. Répéter le traitement après 4 à 6 semaines.

## KENOFIX 300 ML SPRAY

Kenofix est un spray désinfectant qui forme une barrière autour de la plaie. Il dépose aussi un film sur la plaie et n'est pas soluble dans l'eau.

Des tests révèlent qu'une action bactérienne est toujours présente après 4 jours.

Mortellaro



La ligne blanche



3



## HOOFFIT GEL 300 ML

Le gel Hoof-fit d'Intra contient du cuivre et du zinc et convient particulièrement pour traiter les problèmes aux onglons individuellement.

- Nettoyer les onglons correctement. Veiller à éliminer tout le lisier, même
- dans l'espace interdigité. Sécher ensuite les onglons.
- 2. Etaler le gel Hoof-fit sur l'infection et dans l'espace interdigité avec le pinceau fourni.
- 3. Grâce à sa puissante adhérence unique, le gel Hoof-fit agit pendant 4-5 jours.
- Procéder ensuite à une nouvelle application.
- 4. En cas de grave problème, nous conseillons de bander les onglons avec un pansement. Retirer le bandage après 4 jours max. et appliquer à nouveau le gel Hoof-fit (cette fois sans bandage).



## EASYSOL 100 ML

4

Combinaison d'acides organiques qui désinfecte les plaies aux onglons. A appliquer non dilué sur les onglons. A utiliser aussi bien dans la cage de parage que dans la fosse de traite. Dans la fosse de traite, à appliquer seulement après la traite !

Dès l'entrée dans la fosse de traite, d'abord rincer les onglons, les laisser sécher pendant la traite, appliquer ensuite le produit sur les onglons.



## DIGIDERM SPRAY 100 ML

Pulvériser les vaches boiteuses avec le Digiderm Spray 5x par semaine. Egalement à utiliser pour les vaches tarées et le jeune bétail si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un pédiluve.



# KITS DE TRAITEMENT DES ONGLONS

## TECHNOVIT 6091 10 TRAITEMENTS AVEC ACCÉLÉRATEUR

Technovit Easy 10 est un kit prêt à l'emploi pour coller des talonnettes en bois sur l'onglon.

Un kit complet comprend 1 kg de poudre avec le liquide adéquat, des talonnettes en bois, des mélangeurs pour 10 traitements et un accélérateur qui réduit le temps de séchage de moitié.



## TECHNOVIT 2 BOND KIT

Colle 2 composants en kit pour le traitement des onglons, séchage rapide (30s), convient pour les talonnettes en bois et en plastique, facile à utiliser. Ce kit comprend : 1 cartouche pour 10 traitements, 10 canules de mélanges, 10 talonnettes, 1 pistolet doseur.



### A utiliser avec précaution

- Casser l'embout de la cartouche.
- Presser des deux côtés jusqu'à écoulement d'une quantité identique de liquide.
- Vissez la canule sur la cartouche. -
- Traiter les onglons
- Laisser ensuite la canule sur la cartouche et rangez-la dans un endroit sec.

A la prochaine utilisation, retirer la canule, presser des deux côtés jusqu'à écoulement d'une quantité identique de liquide, visser une nouvelle canule et le traitement peut démarrer.

- Kit avec pistolet
- Kit sans pistolet
- Cartouche
- Conseils de mélange
- Appareil chauffant: Appareil utilisé pour chauffer la base 2 composants.



## DEMOTEC 95

Demotec 95 permet d'appliquer les talonnettes en bois facilement ; 1 paquet convient pour 14 traitements.

Diluer le sachet de poudre dans l'eau et bien mélanger. En quelques secondes, on obtient une masse sirupeuse malaxable. Appliquer ensuite ce sirop sur les ongles avant de coller la talonnette en bois.

Directement prêt à l'emploi après mélange, ne colle pas aux doigts.



# ACCESSOIRES

## BANDAGE TAILLES LARGE ET XLARGE

Bandage spécial qui s'enfile facilement sur le sabot. Le bandage est imperméable et protège la plaie des saletés de l'extérieur. Il est possible d'ajouter un produit désinfectant/soignant dans le bandage. Il permet de contrôler l'état de guérison de la plaie à tout moment, sans enlever tout le bandage. Conditionné par 10.



## VETLASTIC

Bandages bleus adhésifs 10 cm, 18 pièces dans une boîte.



## OUATE

Ouate en rouleau 1kg



## COMPRESSES 10 CM X 10 CM



## DISQUES DE PARAGE

### Disque de parage Zecdisc

Idéal pour lisser la surface avant de placer une talonnette, moins de corne qu'un disque en métal



### Disque de parage Philipsen 115 MM

Disque de parage en cuivre à grains, **densité moyenne**

- Densité moyenne, granulométrie 30
- Recommandé pour corne molle
- Moins de nettoyage comparé à une densité forte
- Qualité irréprochable
- Pas d'affûtage de finition nécessaire.
- Pas de lubrification
- Pas de production de chaleur pendant l'affûtage.
- Couche PTFE



### Disque de parage Super philipsen 115 MM

grains, **densité forte**

- Qualité irréprochable : pas d'affûtage nécessaire, revêtu téflon, pas de production de chaleur.
- Forte densité, granulométrie recto 30, verso 10
- Recommandé pour l'agriculteur/ le soigneur expérimenté



### Disque de parage pro trim aluminium 114 MM

Notre nouveau disque de parage ProTrim est un outil novateur pour le parage professionnel des onglons.

- Ce disque spécialement conçu pour le parage des onglons convainc par son excellente capacité de coupe.
- Surface de coupe très nette et excellentes propriétés de préhension.
- Excellent traitement de la sole de l'onglon et de l'espace interdigité.
- La surface impeccablement parée ne requiert pas de supplémentaire.
- Son faible poids et la disposition asymétrique des lames assurent un fonctionnement plus silencieux.
- Le bord plein limite la projection de rognures et réduit le risque de blessure chez l'animal et l'utilisateur.
- 6 lames réversibles interchangeables en métal dur incluses
- Lames 4 faces réversibles pour un rapport qualité-prix optimal, facile à utiliser grâce à l'assemblage par vis.
- Hauteur de coupe : 2 mm, max. 5000 sabots



**Nouveau**

## ASSORTIMENT DE RÉNETTES

### Rénette double

- Poignée ergonomique en bois pour un travail sans difficulté
- Acier inoxydable de qualité supérieure pour une plus longue durée d'utilisation et le meilleur affûtage possible
- Lame étroite de 20 cm à double tranchant, moyen et large
- Coupe en deux phases pour une meilleure précision.



### Rénette Aesculaap pour droitier

- Poignée ergonomique en bois pour travailler sans se fatiguer.
- Acier carbone inox de première qualité pour les meilleures propriétés d'affûtage et une plus grande durée d'utilisation.
- Lame deux couches de 20 cm de long, modèles small, medium et large.
- Coupe en 2 phases pour une précision maximale.



### Rénette Aesculaap pour gaucher



## SEMELLES

### Semelle 110 mm en bois

### Semelle 114 mm en bois

forme brevetée à base de fibres de bois

### Semelle 114 mm holo

- En fibres de bois
- Matériau biodégradable
- Forme brevetée
- Les alvéoles à la surface assurent une distance optimale entre l'onglon et la semelle.
- Les trous intégrés à la surface et les cavités alvéolaires créent une structure stable par collage.



**Nouveau**



# TRAITEMENT PRÉVENTIF

## PEDILINE PRO 25 L

Pediline pro est une solution synergique de deux composants quaternaires et de glutaraldéhyde. Il ne contient pas de métaux lourds. Il a une composition unique à large spectre, un excellent pouvoir pénétrant et maintient une bonne activité, même en présence de saletés. Pediline Pro est le produit à utiliser par excellence pour un traitement efficace des onglons, aussi bien en prévention (pédiluve) qu'en traitement curatif (à pulvériser 5 à 10 % de dilution). L'application peut se faire pendant la traite et ce, à raison de 2 traites successives par semaine. Si vous utilisez une lance à mousse, il est possible de faire mousser Pediline Pro, ce qui peut parfois faciliter le traitement.



## DIGIDERM PREMIX 15 L EN 200 L

Mélange liquide de Digiderm et de sulfate de cuivre à utiliser dans le pédiluve.  
A utiliser contre la maladie de Mortellaro.



# PÉDILUVES

## PÉDILUVE SUPERPROFI

- Très solide, il est possible de raccorder différents pédiluves dans 4 directions. Très pratique : la capacité en litres est inscrite à l'intérieur, ce qui permet donc de le remplir et de doser parfaitement.
- Dimensions : 203x80x18.5 (LXDXH).
- 200 litres



## MATELAS PÉDILUVE POUR ROBOT

Le matelas est posé à un endroit de passage sur le sol, par exemple à la sortie du robot de traite. Le passage d'une vache sur le matelas et de ses pattes sur les boules rouges actionne l'ouverture de la valve. Un jet puissant de liquide (une solution d'eau et de Pediline Pro) est ensuite pulvérisé sur les pattes. Comme un nouveau jet de liquide est pulvérisé à chaque fois, le traitement est donc particulièrement efficace. De constitution solide, le tout fonctionne sans électricité.



## CAGES DE PARAGE

Une cage de parage sûre pour l'utilisateur dans laquelle les bovins entrent facilement accélère le travail de l'agriculteur !

Consultez notre site web pour découvrir nos modèles et leurs options.





**FARMING  
FORWARD**

[www.agrologic.be](http://www.agrologic.be)

**Agro Logic**

**Menensesteenweg 305A**

**8940 Wervik**

**T: 056 23 67 40**

**[info@agrologic.be](mailto:info@agrologic.be)**

**[WWW.AGROLOGIC.BE](http://WWW.AGROLOGIC.BE)**